


SARSコロナウイルス抗原キット

体外診断用医薬品

製造販売承認番号30400EZ00039000

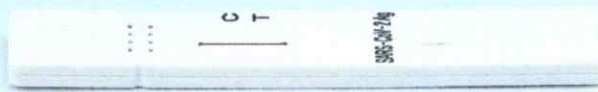

アンスペクトコーワ SARS-CoV-2


- 唾液タイプの抗原検査キット
- 新型コロナウイルスを15分で検出

唾液採取方法

以下のいずれかの方法で唾液を採取してください。


注意:ご使用の際は、キットに同梱されている使用説明書をよくお読みください。

口腔採取法

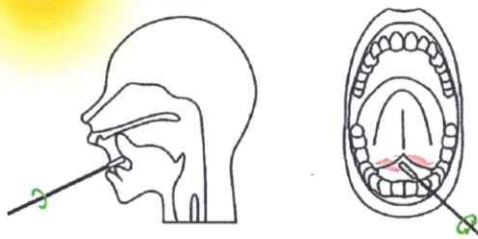

綿棒を口に含み、下あごに溜まった唾液を直接採取します。

容器採取法

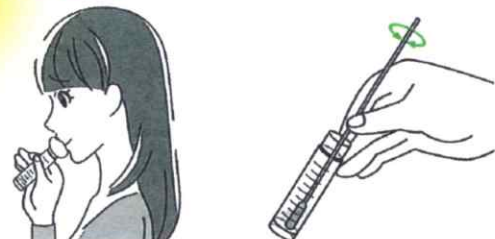

唾液採取用滅菌容器等に唾液を採取し、容器の唾液に綿棒を十分浸みわたらせて採取します。

注意: 唾液採取用滅菌容器は、本製品には付属しておりません。別途、滅菌容器等をご用意ください。

【唾液検体採取¹⁾²⁾】

- 唾液検体の検出感度は、鼻咽頭ぬぐい液と同程度です。
- くしゃみなど飛沫を発生しにくいため周囲への感染拡散のリスクが低減できます。
- 侵襲性が低く、高齢者や小児でも唾液検体の採取が可能です。
- 検体採取の際、飲食(飲水を含む)や喫煙、歯磨き、うがい直後の唾液採取はウイルスの検出に影響を与える可能性があるため避ける必要があります。
- 唾液採取用滅菌容器等を使用する際は唾液採取時に採取容器の外側に汚染する可能性があるため、容器外側の適切な消毒等の工夫が必要となります。

参考 1) 新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針第5.1版 参考 2) 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン